

AXIOM

for Kids

BACKS

PIÈCES DE FIXATION DU DOSSIER AXIOM KIDS

GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE

Outils nécessaires:

- Clé de 10 mm





- Mètre à ruban ou niveau




L'ensemble comprend:

Deux jeux de fixations sont fournis. Clé de fixation de référence ci-dessous.

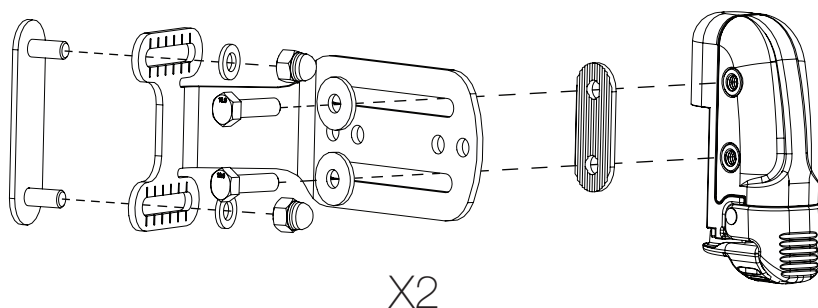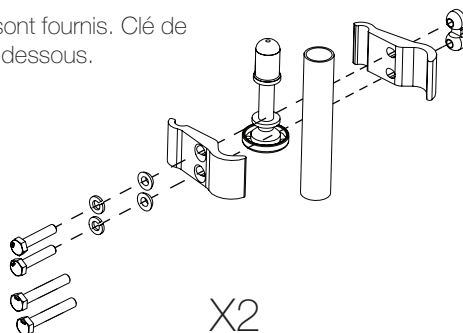


Clé de fixation:

Les dessins des fixations correspondent aux dimensions réelles, ce qui permet de comparer le matériel aux dessins.

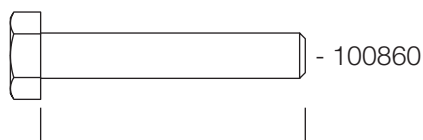


35mm (Utilisé pour les cannes à dossier de 1" et 1-1/8")

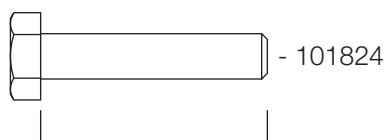


30 mm (utilisé pour les cannes arrière de 3/4" et 7/8")

Configuration générale (avant livraison)


- ① Installez le support du dossier à l'arrière de la coque du dossier avec la plaque de goujon, deux rondelles et deux écrous à l'aide d'une clé de 10 mm. Laissez les pièces de fixation desserrées. Répétez ce processus sur le côté opposé.

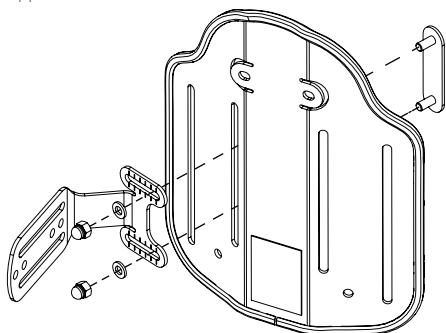

- ② Installez le boîtier sur le support avec deux boulons, deux rondelles et une selle au moyen d'une clé de 10 mm. Laissez les pièces de fixation desserrées. Répétez ce processus sur le côté opposé.

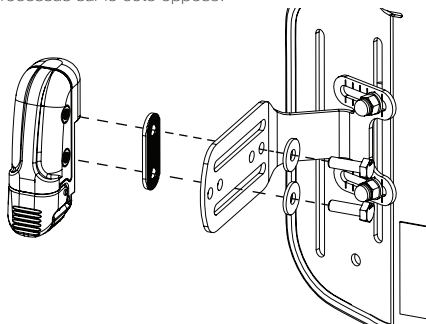


- ③ Repérez le dossier du fauteuil. Déterminez la hauteur approximative souhaitée pour l'utilisateur et les possibilités de réglage souhaitées. Des supports d'extension en option sont disponibles si un réglage supplémentaire vers l'avant est nécessaire. Habituellement, le dossier se trouve entre 2,5 et 5 cm au-dessus du coussin.

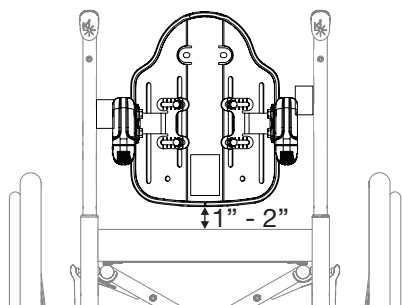


- ④ Déterminez les fixations par pince nécessaires en vous référant à la clé de fixation figurant à la page précédente de ce document.


- ⑤ Fixez les pinces sans les serrer sur les barres du dossier à l'endroit désiré, comme indiqué à l'étape 3. Les boulons doivent être vissés vers l'intérieur depuis l'extérieur du fauteuil. Serrez suffisamment la pince pour qu'elle reste en place et répétez l'opération de l'autre côté.

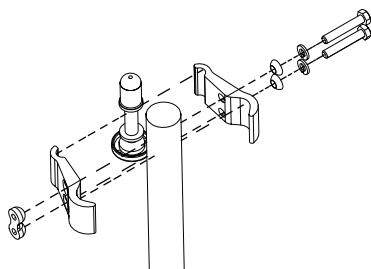


- ⑥ Utilisez un niveau et un mètre ruban pour vous assurer que les pinces sont de niveau et que la distance entre la barre arrière et la fixation de la pince est de 1/2 pouce.

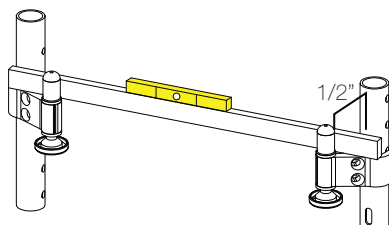

- ⑦ Installez l'ensemble du dossier sur les supports de serrage. Réglez la hauteur du dossier en montant ou descendant le dossier le long de la plaque jusqu'à la hauteur souhaitée.

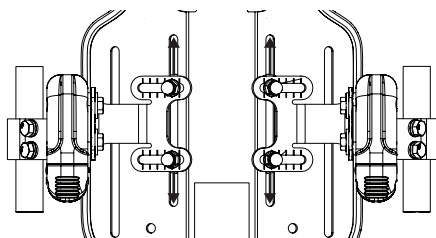

- ⑧ Réglez la profondeur et l'angle en déplaçant l'ensemble du dossier dans les positions souhaitées. Une fois la position choisie, assurez-vous que les boulons sont fixés dans la même position des deux côtés du fauteuil.

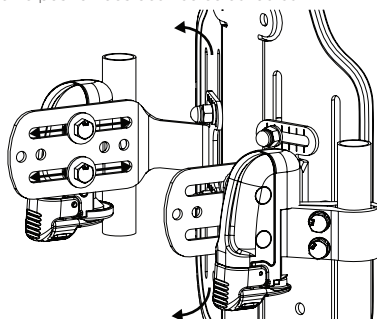

Procéder à la vérification, voir la section Vérification dans la section suivante.



Ajustements (en présence de l'utilisateur)

⚠️ AVERTISSEMENT ⚠️

AVERTISSEMENT : IL POURRAIT ÊTRE ENVISAGEABLE D'AJUSTER LA POSITION FINALE DU DOSSIER AXIOM LORSQUE L'UTILISATEUR FINAL EST ASSIS DANS SON FAUTEUIL ROULANT. POUR CE FAIRE, L'UTILISATEUR FINAL DOIT POUVOIR S'ASSEoir DANS UNE POSITION STABLE SANS UTILISER LE DOSSIER. CELA EST ÉGALEMENT POSSIBLE SI DES PERSONNES PEUVENT SOUTENIR L'UTILISATEUR FINAL PENDANT LE RÉGLAGE. UN CLINICIEN FORMÉ À CET EFFET DOIT S'EN ASSURER. ASSUREZ-VOUS TOUJOURS QUE LES DISPOSITIFS DE BLOCAGE DES ROUES DU FAUTEUIL ROULANT ET LES ANTI-BASCOULES SONT RÉGLÉS ET VERROUILLÉS. SI CES CONDITIONS NE SONT PAS REMPLIES, L'UTILISATEUR FINAL DOIT SE TRANSFÉRER DU FAUTEUIL ROULANT AVANT TOUT RÉGLAGE. LE NON-RESPECT DE CES PRÉCAUTIONS PEUT ENTRAÎNER UNE CHUTE ET UN RISQUE DE BLESSURE GRAVE.

1 Réglez la profondeur et l'angle en déplaçant l'ensemble du dossier dans les positions souhaitées. Une fois la position choisie, assurez-vous que les boulons sont fixés dans la même position des deux côtés du fauteuil.

2 Réglez la hauteur du dossier en desserrant les deux boulons du support du dossier. Faites glisser la coque vers le haut ou vers le bas à la hauteur souhaitée et resserrez les boulons une fois la position désirée obtenue.

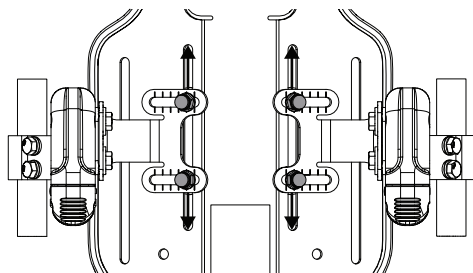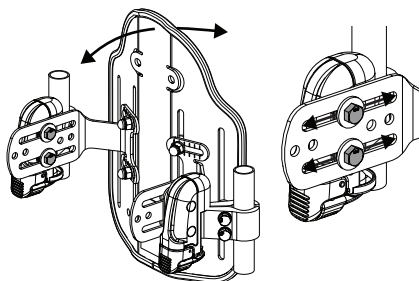

Procéder à la vérification -

- Serrez complètement toutes les fixations et assurez-vous que le matériel ne sort pas de sa position ajustée sous la charge de l'utilisateur.
- Vérifiez que le dossier se déverrouille et se verrouille facilement.
- Soulevez le dossier par la sangle et assurez-vous qu'il reste verrouillé.

Si vous avez des questions concernant ce dossier AxioM,
n'hésitez pas à nous contacter :

Téléphone:
715-254-0991

Par écrit à:
Ki Mobility
5201 Woodward Drive
Stevens Point, WI 54481
U.S.A

Ou par email à:
sales@kimobility.com



Ki Mobility
5201 Woodward Drive
Stevens Point, Wisconsin 54481
715-254-0991
www.kimobility.com